

Bentlon DermaShaper

Instant facelift



BENTLON

A close-up photograph of a woman lying down, her eyes closed, receiving a facial treatment. A practitioner's hand is visible holding a blue and green DermaShaper device against her cheek. Another hand is visible near her neck, holding a circular blue electrode pad. The woman is wearing a white towel on her head.

| De instant facelift |

Bentlon introduceert de volledig nieuwe DermaShaper, een multifunctioneel microcomputer gestuurd apparaat voor gezichtsbehandelingen. De nieuwe Bentlon DermaShaper heeft drie behandelmogelijkheden voor verschillende toepassingen, namelijk ultrasoonbehandeling, elektrotherapie en ionisatie. Het bijzondere van deze drie toepassingen is, dat ze niet alleen afzonderlijk toe passen zijn, maar ook gecombineerd kunnen worden waardoor een breed spectrum van behandelingen gecreëerd kan worden.

| Ultrasoon |

Ultrasoon zijn zeer hoge geluidsgolven die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Deze geluidsgolven wekken trillingen op die effectief toegepast kunnen worden bij gezichtsbehandelingen. Bij de DermaShaper is het mogelijk om met continue of pulserend ultrasoongeluid te werken. Ultrasoon heeft diverse effecten op de huid. Door de energie van de ultrasoongolven en de warmteontwikkeling wordt het celmetabolisme versneld waardoor een sneller herstel van de huid bewerkstelligd wordt. Ook wordt het celmetabolisme gereactiveerd door stimulatie van de fibroblasten. De doorlaatbaarheid van de huid wordt verhoogd waardoor actieve werkstoffen beter in de huid gebracht worden. Door de trillingen die de ultrasoon maakt, ontstaan in de huid moleculaire wrijvingen, waardoor verharde of verkleefde vezelstructuren verminderen. Andere toepassingen van continue of pulserend ultrasoongeluid zijn spierontspanning, pijnvermindering, betere doorbloeding en bevordering van het regeneratievermogen van de huid. Tenslotte heeft ultrasoon ook een drainerende werking.

| Elektrotherapie |

Bij de elektrotherapie wekken de stroomimpulsen spiercontracties op. Voor elke spiercontractie is een verhoogde bloedtoevoer nodig en daarmee kan met elektrotherapie een veel krachtigere en intensere doorbloeding bereikt worden dan wat met een manuele massage te bereiken is. Bovendien worden door elektrotherapie de verslapte spierweefsels versterkt en worden vetophoping in het weefsel afgebouwd.

| Ionisatie |

Bij ionisatie wordt gebruik gemaakt van gelijkstroom. De gelijkstroom laat werkstoffen dieper in het weefsel doordringen, wat ook vaak insluizen genoemd wordt. De opname van de werkstoffen is effectiever en gemakkelijker, waarmee de werkzaamheid van de producten aanmerkelijk verhoogd wordt.

| Het apparaat |

De DermaShaper is een bijzonder compact apparaat dat gemakkelijk op elke werktafel in de salon te plaatsen is. De uitgebreide digitale display laat voortdurend alle instellingen zien en de individuele instellingen kunnen gedurende de behandeling naar believen bijgesteld worden. Voor elke klant kan een puur persoonlijke instelling gemaakt worden, al naar gelang de intensiteit en zonder dat de klant het als onprettig ervaart. De 10 meest gebruikte instellingen kunt u opslaan in het interne geheugen en eenvoudig oproepen, zodat niet steeds alle instellingen opnieuw ingevoerd hoeven worden.

| Instellen |

Het instellen van de DermaShaper kan per behandelmethode afzonderlijk en als combinatiebehandeling. Stapsgewijs worden de betreffende parameters ingesteld. Een zeer gebruikersvriendelijke methode die helder en duidelijk is.

| Handstuk |

Het handstuk is ergonomisch gevormd en ligt opvallend prettig in de hand. Bij de behandeling met ultrasoon en ionisatie is het van belang dat er een goed contact is met de behandelkop en de huid. Om zeker te zijn dat de behandeling juist uitgevoerd wordt, beschikt de behandelkop over een lichtring. Indien tijdens de behandeling geen goed contact is tussen de huid en de behandelkop, dan gaat de lichtring aan als signaal. U kunt zich gedurende de behandeling dan ook volledig concentreren op uw klant en u hoeft niet op het apparaat te kijken of de waarden van de instellingen veranderen.

| Regelcircuit |

De DermaShaper is volledig digitaal en computergestuurd. Een intern regelcircuit zorgt dat de waarden zoveel mogelijk constant gehouden worden. Ieder weefsel heeft verschillen in de structuur, afhankelijk van de huiddikte, het vetweefsel, spierweefsel en botweefsel. Hierdoor reageert elk weefsel op een andere manier op bijvoorbeeld het ultrasoon. De door u ingestelde intensiteit wordt door het regelcircuit doorlopend gecontroleerd en bijgesteld om de intensiteit op verschillende weefselstructuren uit te balanceren.



| De behandelingen |

De Bentlon DermaShaper heeft ultrasoon, elektrotherapie en ionisatie in één apparaat verenigd, met de unieke mogelijkheid om verschillende toepassingen met elkaar te combineren.

De Bentlon DermaShaper heeft een zeer intensieve werking met direct zichtbaar resultaat. Direct na de behandeling is een aanzienlijke verbetering van de huid zichtbaar. Zelf enkele dagen na de behandeling voelt de klant nog de aangename nawerking van de behandeling. Een unieke ervaring waarbij de klant het resultaat direct ziet en voelt. De DermaShaper kan ingezet worden voor een breed scala aan behandelingen:

- Intensieve huidverjonging
- Verstevigende gelaatsbehandeling
- Drainage onder de ogen
- Kalmeren en herstellen bij couperose en gevoelige huid
- Kalmeren en herstellen van de getraumatiseerde huid na acnebehandeling, chirurgische ingrepen, IPL behandeling of micro-dermabrasie
- Kalmeren en herstellen van de huid na (zon)verbranding
- Het behandelen van verklevingen en littekens op gelaat en lichaam

| Bentlon Care |

Voor een optimaal resultaat beschikt Bentlon over een speciale serie bentlon Care producten met hoog werkzame ingrediënten. Tijdens de behandelingen wordt met deze Bentlon Care producten gewerkt. Het Bentlon Care assortiment bestaat uit:

Bentlon Contact Gel
Bentlon Preparatory Scrub
Bentlon Cleansing Milk
Bentlon Calming Lotion
Bentlon Skin Rebuilding Serum
Bentlon Skin Balancing Serum
Bentlon Skin Rebuilding Cream
Bentlon Skin Balancing Cream
Bentlon After Treatment Mask

Geef u de behandelingen in kuurverband, dan kan de klant de Bentlon Care producten ook thuis gebruiken. Na de kuur kan uw klant weer de producten gebruiken van het merk dat u in de salon voert.



| De resultaten |

De behandelingen met de Bentlon DermaShaper geven direct zichtbaar en voelbaar resultaat. De huid krijgt meer spanning, rimpels zijn minder diep, wallen zijn zichtbaar minder en de huid vertoont aanzienlijk minder roodheid. De behandeling met de DermaShaper wordt dan ook de instant facelift genoemd. Deze behandelingen zijn op zich al zeer effectief, maar u kunt de DermaShaper ook inzetten als intensieve nabehandeling bij micro-dermabrasie of IPL flitslicht behandelingen. Na deze behandelingen vertoont de huid over het algemeen veel roodheid, die u kunt verzachten en kalmeren met de Bentlon DermaShaper.



**Huidverjongingsbehandeling
voor**



**Huidverjongingsbehandeling
na**





| Totaalconcept |

De Bentlon DermaShaper is niet alleen een apparaat, maar een volledig uitgewerkt totaalconcept. De ondersteuning is buitengewoon hoog en professioneel. Naast een schitterend apparaat met tal van nieuwe behandelingen in uw salon, ontvangt u de beste service en begeleiding.

| Marketingondersteuning |


Op het gebied van marketing en promotie hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. U ontvangt een Cd-rom met marketing- en promotiemateriaal om uw nieuwe specialisatie uitgebreid onder de aandacht te brengen. De persberichten op de CD kunt u naar de lokale kranten en bladen sturen, met de mailingteksten kunt u verschillende mailingen naar uw eigen klantenbestand sturen en op de CD staan professionele advertenties met de verschillende toepassingsmogelijkheden, waarin u alleen nog maar uw salonnaam hoeft te plaatsen. Heeft u een eigen site, dan staan op de CD de volledige teksten van de consumentenfolder en fotomateriaal, zodat u uw site kunt uitbreiden met informatie en 'voor' en 'na' foto's. Natuurlijk ontvangt u ook de consumentenfolders met een duidelijke uitleg over de behandelingen.

| www.uwnieuwehuid.nl |

In uw promoties kunt u uw klanten ook verwijzen naar de speciale site www.uwnieuwehuid.nl. Op deze site wordt uitgebreid uitleg gegeven wat de Bentlon DermaShaper voor uw bestaande en nieuwe klanten kan betekenen. U wordt op deze site vermeldt met adres en telefoonnummer als gecertificeerd Bentlon DermaShaper specialist. Dancorh Corporation zorgt voor een landelijke promotie van deze site.

| Scholing |

Het mag voor zich spreken dat u geheel gratis een uitgebreide scholing en bijbehorend cursusboek ontvangt. In theorie en praktijk worden de behandelingen geleerd. Uiteraard ontvangt u het officiële Bentlon certificaat met vermelding van Bentlon Derma Shaper Specialist.

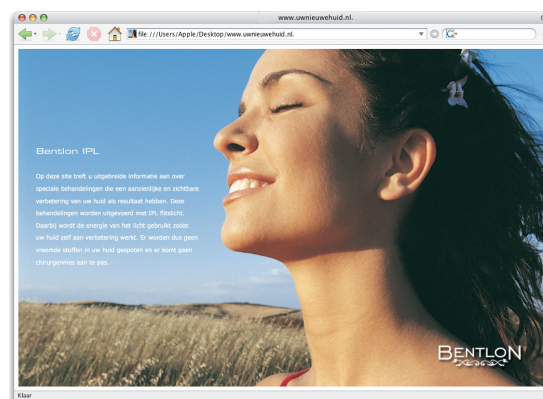

www.uwnieuwehuid.nl

| Zeer compleet |

Het volledig Bentlon DermaShaper concept bestaat uit het volgende:

- Bentlon DermaShaper apparaat
- Bentlon DermaShaper handstuk met lichtring
- Ionisatie elektrodes
- Bentlon Care productpakket
- Uitgebreide training in de behandelingen
- Consumentenfolders
- CD-rom met persberichten, mailingen, advertenties, fotomateriaal en teksten

| Eerst zelf ervaren? |

In deze brochure trachten wij u een zo compleet mogelijk beeld te geven over de Bentlon DermaShaper. Toch zijn wij van mening dat u pas echt overtuigd bent wanneer u zelf eens de Bentlon DermaShaper kunt voelen. Graag bieden wij u de mogelijkheid om keneis te maken met deze uiterst effectieve wijze van huid-behandeling tijdens onze kennismakingsdagen. Neem contact op met Dancohr Corporation op welke data deze kennismakingsdagen gepland zijn.

| Technische specificaties |

Ref.nr. 230 V	60445
Breedte x Diepte x Hoogte	35 x 27 x 16 cm
Gewicht	8 kg
Ultrasoonbehandeling	ja
Elektrotherapie	ja
Ionisatie	ja
Memory standen	10
Bediening	menu gestuurd/tiptoetsen
Weergave	LCD scherm
Voeding	230 V
Cursus en certificaat	ja
Bentlon Care producten	ja
Extra ondersteuning	Uitgebreide training
	Marketing ondersteuning

| Bentlon |

Bentlon apparatuur wordt geproduceerd door Dancohr Corporation BV. Meer dan 35 jaar ervaring zit ingebouwd in elk Bentlon product. Dancohr beschikt over de ISO 9001 en ISO 13485 certificering, wat voor u de garantie is voor uitmuntende kwaliteit. De Bentlon DermaShaper is volledig ontwikkeld volgens de modernste technologie. Hiermee worden alle bestaande normen op een hoger niveau gezet. Kiezen voor Bentlon is kiezen voor kwaliteit.

KEMA CERTIFICATE



DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION C-012

Certification nr. 2074522

KEMA CERTIFICATE



DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION C-012

Certification nr. 2074523





Dancohr Corporation BV

Marconilaan 8
6003 DD Weert
Nederland

Telefoon Centrale	(+31) (0)495 434 600
Telefoon Verkoop	(+31) (0)495 434 601
Fax	(+31) (0)495 434 699
E-mail	info@dancohr.com
Website	www.bentlon.com

Openingstijden

Kantoor en showroom ma t/m vrij van 8.30 – 17.00 uur.

Showroom zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Niet alle zaterdagen geopend, bel vooraf om teleurstelling te voorkomen.

Kijk voor een routebeschrijving op www.dancohr.com.

www.bentlon.com